


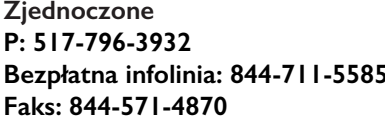

Versah, LLC
2000 Spring Arbor Rd Suite D
Jackson, Michigan 49203 Stany
Zjednoczone
P: 517-796-3932
Bezpłatna infolinia: 844-711-5585
Faks: 844-571-4870



Wyjałować przed użyciem



Wskazania do stosowania: 1. Wiertła Densah® i krótkie wiertła Densah® są wskazane do stosowania w celu przygotowania osteotomii do umieszczenia implantu śródkostnego w żuchwie lub szczęce. Kiedy wiertło Densah® obraca się z prędkością 1000 obrotów na minutę w kierunku przeciwnym, nietnącym, z jednorodną zewnętrzną irygacją, w przestrzeni trabekularnej wzdłuż ścian i podstawy osteotomii następuje autoprzeszczep kości zbitej. (Dane własne) 2. Stożkowe wiertło pilotujące Densah® i krótkie stożkowe wiertło pilotujące Densah® służą do tworzenia początkowego otworu w kości w celu przygotowania osteotomii do umieszczenia implantu śródkostnego. 3. Trzpień równoległy służy jako prowadnik równoległy wiertel Densah®. 4. Uniwersalny uchwyt wiertła jest uchwytem przeznaczonym dla wiertel Densah®, krótkich wiertel Densah®, stożkowych wiertel pilotujących Densah®, krótkich stożkowych wiertel pilotujących Densah®, przedłużki do wiertła Versah® i trzpieni równoległych. 5. Klucz G-Stop® i przymiar pionowy G-Stop® zapewniają kontrolę w pionie na potrzeby wiercenia osteotomii. Klucz G-Stop® i przymiar pionowy G-Stop® mogą być używane z wydrukowanymi prowadnicami (tuleje C-Guide® do kontroli kąta nachylenia otworu). 6. Tuleje C-Guide® umieszcza się w prowadniku chirurgicznym w pracowni dentystycznej, odpowiednio do anatomii danego pacjenta. 7. Uchwyt G-Stop® jest uchwytem przeznaczonym dla wiertel Densah®, krótkich wiertel Densah®, przedłużki do wiertła Versah®, trzpieni równoległych, stożkowego wiertła pilotującego, krótkiego stożkowego wiertła pilotującego, przymiarów pionowych G-Stop® oraz kluczy G-Stop®. 8. Wiertła ZGO™ Densah® są wskazane do stosowania w celu przygotowania osteotomii do umieszczenia implantu w szczęce (w tym implantu kości jarzmowej i skrzydłowej). 9. Stożkowe wiertła pilotujące ZGO™ służą do tworzenia początkowego otworu w kości w celu przygotowania osteotomii do umieszczenia implantu zygomaticznego i monitorowania głębokości wiercenia. 10. Uniwersalny uchwyt wiertel ZGO™ Densah® jest wyłącznie uchwytem wiertel ZGO™ Densah®, stożkowych wiertel pilotujących ZGO™ i kluczy kierowanych ZGO™. 11. Klucze kierowane ZGO™ zapewniają kontrolę wiercenia podczas osteotomii. Klucz ZGO™ może być używany z drukowanymi prowadnicami z tulejami C-Guide® do kontrolowania kąta osteotomii. 12. Tuleje ZGO™ C-Guide® umieszcza się w prowadniku chirurgicznym ZGO™ w pracowni dentystycznej, odpowiednio do anatomii danego pacjenta i zgodnie z planem leczenia. 13. Przedłużka do wiertła Versah® jest używana do zwiększania długości wiertła zatrzaskowego, zapewniając wystarczający odstęp głowy kątownicy stomatologicznej od otaczających struktur anatomicznych.

Instrukcja użytkowania i procedury: więcej informacji można znaleźć na stronie versah.com.

Instrukcje dotyczące montażu i demontażu: więcej informacji można znaleźć na stronie versah.com.

Bezpieczna utylizacja: produkty należy usuwać zgodnie z praktyką kliniczną dotyczącą usuwania wyrobów chirurgicznych wielokrotnego i jednorazowego użytku oraz zgodnie z przepisami w kraju użytkownika.

Emergo NZ
24 Side Road
RD 10, Parkhill Farm
Hastings 4180